


Anleitung zum Vaginalabstrich

1. Hände desinfizieren


2. Tupfer vorbereiten

Röhrchen öffnen, aufstellen und Deckel dazulegen
Tupfer aus steriler Verpackung nehmen

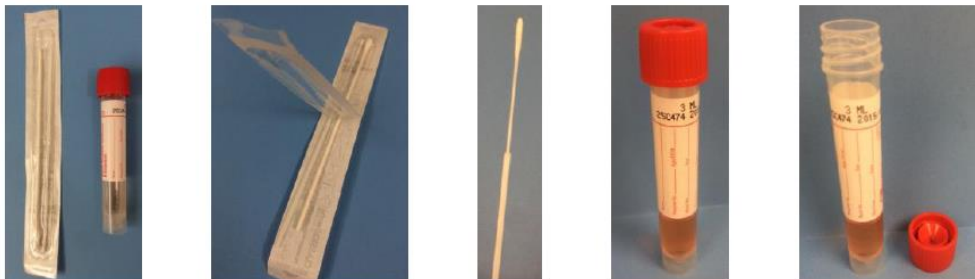

3. Vaginalabstrich

Mit einer Hand Schamlippen spreizen, mit anderer Hand
Tupfer mit drehender Bewegung 4-5 cm in Scheide
einführen, und ca. 20 sec. mit etwas Druck Scheidenwand
abstreichen

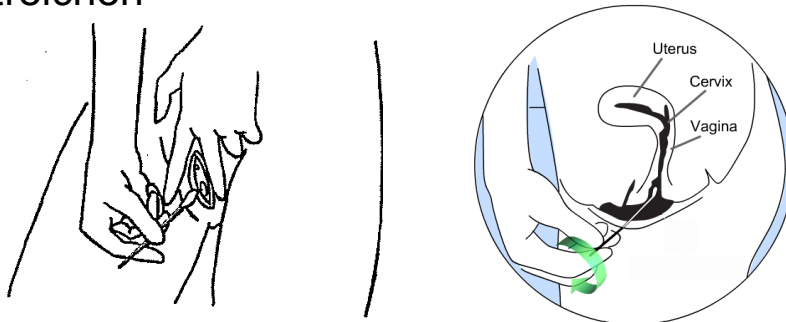

4. Tupfer in Versandröhrchen

gut schwenken, ausdrücken und wegwerfen. Röhrchen
gut verschliessen. **Hände desinfizieren.**

